


## Swift™ LT

NASAL PILLOWS SYSTEM




## Swift nosové vankúšky™

/Nasadenie masky /

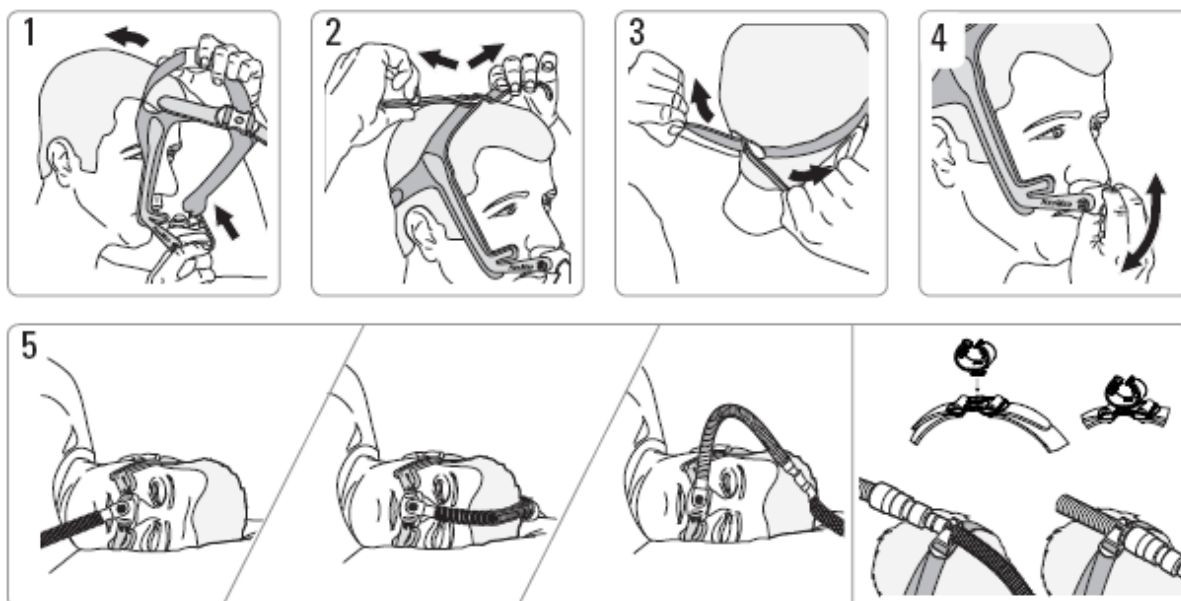


## Swift nosové vankúšky™

/ Rozobratie, Demontáž /

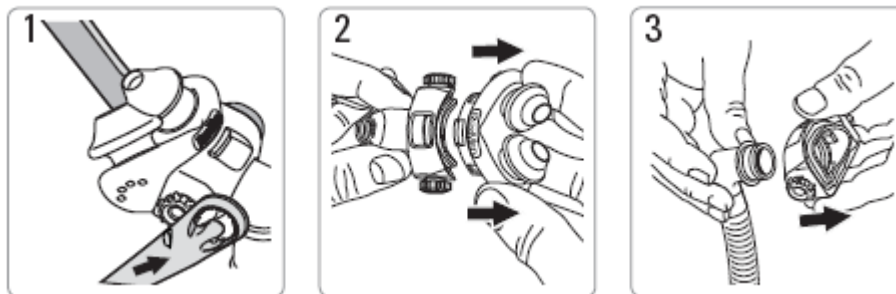

## Swift nosové vankúšky™

/ Opätovné zloženie /

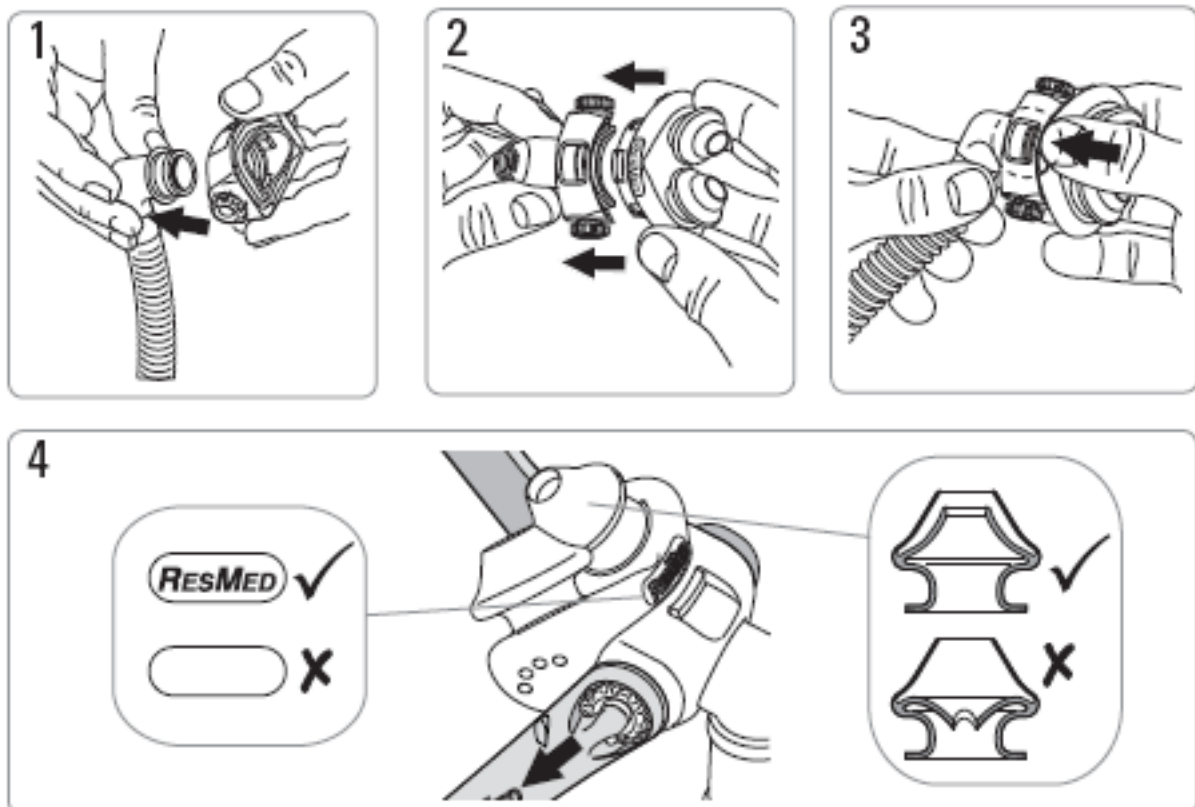

## Swift novosé vankúšiky™

Nosová maska S VETRACÍMI OTVORMI

• CELOTVÁROVÁ MASKA S VETRACÍMI OTVORMI • systémy nosových vankúšikov

### Určené použitie

Maska slúži na neinvazívne usmerňovanie prítoku vzduchu k používateľovi z dýchacieho prístroja s pozitívnym pretlakom v dýchacích cestách (PAP).

Maska je určená:

- pre dospelých používateľov (nad 30 kg), ktorí majú predpísané používanie dýchacieho prístroja s pozitívnym pretlakom v dýchacích cestách,
- na opakované použitie pre jedného používateľa v domácom prostredí a na opakované používanie pre viacerých pacientov v nemocničnom/zdravotníckom prostredí.

### Používanie masky

- Riadte sa pokynmi svojho lekára alebo spánkového terapeuta.
- Nastavte masku podľa pokynov v časti na Nastavenie a zostavenie.
- Neutahujte príliš pásy náhlavnej súpravy. Ak cítite únik vzduchu, treba:

- znovu nastaviť masku alebo zmeniť jej polohu
- upraviť náhlavnú súpravu
- skontrolovať správnosť zostavenia masky
- kontaktovať lekára alebo spánkového terapeuta pre opätovné nastavenie masky.

- Návod na používanie špecifické pre masku sú dostupné na lokalite [www.resmed.com](http://www.resmed.com), na stránke **Products** pod **Service & Support**. Spoločnosť ResMed ich tiež zašle na požiadanie.

Systém masky neobsahuje latex, PVC ani DEHP materiály.

### Nastavenia prístroja

Možnosti nastavenia masky pre prístroje ResMed sú uvedené v „Zoznam kompatibilných másk a prístrojov“ na lokalite [www.resmed.com](http://www.resmed.com), na stránke **Products** pod **Service & Support**.

### Rozobratie

Rozoberte masku podľa pokynov v časti na Nastavenie a zostavenie.

### Opätovné zloženie

Zostavte masku podľa pokynov v časti na Nastavenie a zostavenie.

### Domáce čistenie masky

- Masku a náhlavnú súpravu umývajte len v rukách. Náhlavnú súpravu je možné umyť bez odstránenia spón.
- Pri čistení dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu ani strate súčiastok.

### Denne/Po každom použití

- Pre optimalizáciu tesnenia masky odstráňte pred použitím z podušky masť z tvárovej pokožky.
- Masku nenamáčajte.
- Masku umyte v rukách miernym trením v teplej vode (30 °C) jemným mydlom alebo rozriedeným prostriedkom na riad.
- Všetky súčasti dobre opláchnite pitnou vodou a nechajte ich voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.
- Ak je vetrací otvor zablokovaný, očistite ho kefkou s mäkkými štetinami.

### Raz za týždeň

Náhlavnú súpravu umyte v rukách v teplej vode (30 °C) jemným mydlom alebo rozriedeným prostriedkom na riad. Dobre ju opláchnite a nechajte voľne vyschnúť mimo priameho slnečného svetla.

### Skladovanie

Pred skladovaním na akúkoľvek dobu sa presvedčte, či je maska úplne čistá a suchá. Masku skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného svetla.

### Likvidácia

Maska neobsahuje žiadne nebezpečné látky a môže sa likvidovať spolu s bežným domácim odpadom.

### Symboly

Na maske alebo jej obale sa môžu vyskytovať nasledujúce symboly: Pozor, prečítajte si sprievodnú dokumentáciu, LOT Číslo zásielky, REF Číslo dielu, Odporúčaný rozsah teploty, Odporúčaný rozsah vlhkosti, Neobsahuje latex.

### Výstrahy

- Vetracie otvory musia byť voľné.
- Masku sa nesmie používať, ak nie je prístroj PAP zapnutý, a ak nepracuje správne.
- Pri používaní kyslíka z náhradného zdroja dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia.
- Ak nepracuje prístroj PAP, prietok kyslíka musí byť vypnutý, aby sa nepoužitý kyslík neakumuloval v uzávere prístroja, a nevytváral tak nebezpečenstvo požiaru.
- Pri stabilnom prietoku kyslíka z náhradného zdroja sa koncentrácia inhalovaného kyslíka mení v závislosti od nastavenia tlaku, dýchacieho rytmu používateľa, masky, miesta aplikácie a intenzity úniku.
- Ak je viditeľné akékoľvek poškodenie niektorej súčasti masky (prasknutie, trhliny atď.), danú súčasť masky treba odstrániť a nahradiť novou.
- Nepoužívajte roztoky na aromatickej báze ani vonné oleje (napr. eukalyptus alebo esenciálne oleje), bieliace prostriedky, alkohol ani silne voňajúce výrobky (napr. citrusové) na čistenie ktorejkoľvek súčasti masky. Môže dôjsť k vdýchnutiu reziduálnych výparov týchto roztokov, ktoré tiež môžu spôsobiť praskliny, a poškodiť tak masku.
- Za kompatibilitu masky s prístrojom je zodpovedný váš lekár alebo spánkový terapeut. Používanie masky mimo rozsahu uvedeného v špecifikácii alebo v spojení s nekompatibilnými prístrojmi môže spôsobiť neúčinnosť tesnenia a pohodlia masky a nemusí dôjsť k dosiahnutiu optimálnej terapie.
- Nekombinujte súčasti z iných maskových systémov.
- V prípade AKEJKOLVEK nepriaznivej reakcie prestaňte masku používať a obráťte sa na svojho lekára alebo spánkového terapeuta.
- Podrobnosti o nastaveniach a informácie o prevádzke prístroja PAP nájdete v príslušnom návode.
- Ak túto masku používa viacero používateľov, mala by sa pred každou zmenou používateľa dezinfikovať, resp. sterilizovať.

### Dodatočné výstrahy pre celotvárové masky:

- Kolenná a ventilová jednotka majú špecifické bezpečnostné funkcie. Umožňujú dýchať čerstvý vzduch, ak je prísun vzduchu z prístroja PAP do masky sťažený. Masku by sa nemala nosiť, ak je ventil poškodený, keďže v takom prípade nebude môcť plniť svoju bezpečnostnú funkciu. Ventil je treba v prípade poškodenia, zdeformovania alebo natrhnutia vymeniť.
- Používatelia, ktorí si nedokážu masku sami zložiť, musia masku používať pod kvalifikovaným dohľadom. Masku môže byť nevhodná pre osoby s predispozíciou k aspirácii.

### Informácie o záruke

ResMed uznáva všetky práva spotrebiteľov ustanovené smernicou Európskej únie 1999/44/ES a príslušné štátne zákony v rámci Európskej únie týkajúce sa výrobkov predávaných v rámci Európskej únie.

### Klinické informácie

Maska obsahuje pasívne vetranie ako ochranu proti opätovnému vdýchnutiu.

Technické údaje a pokyny pre čistenie, dezinfekciu a sterilizáciu sú dostupné v Návode na používanie špecifickom pre masku na lokalite [www.resmed.com](http://www.resmed.com), na stránke **Products** pod **Service & Support**.